

pH-testremsor pH 0-14 (universal) och pH 4,5-9 (urin,saliv)

för dricksvatten, akvarier, pooler etc.. För urin och saliv blir resultatet tydligare med testremsorna för pH 4,5 - pH 9,0.

Observera:


1. Stick inte ner våta fingrar i förpackningen.
2. Rör inte vid testområdet (fyrkanterna).
3. Förslut förpackningen noggrant efter testning.
4. För bästa resultat studera färgerna i dagsljus.
5. Förvara svalt och torrt.

Instruktion:

1. Doppa teststicken i två sekunder och se till att alla 4 färgade fyrkanter täcks.



2. Skaka av överflödigt vatten håll sen stickan vertikalt. Inom 15 sekunder ändras färgerna.

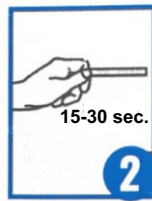

3. Jämför färgskalorna och avläs inom 30 sekunder för korrekt resultat. Förändringar därefter har ingen diagnostisk signifikans.



Test av urin - testområdet är det som heter "Scenario one":

1. testa dagens första och andra urin för säkrast resultat
2. jämför stickan med "Scenario one"

Test av saliv - testområdet är det som heter "Scenario two"

1. testa saliven på morgonen eller 1-2 timmar efter mat eller dryck
2. samla saliv i munnen, svälj och repetera ett par gånger
3. spotta i en sked eller liten skål (stoppa inte in stickan i munnen)
4. doppa stickan 3-4 sekunder i saliven, skaka av överflöd
5. håll stickan vertikalt och jämför med testområdet inom 30 sekunder och se till att jämföra på en väl upplyst plats

Resultat:

pH 7+ är perfekt, pH 6,5 är surt (acidic) och under pH 6 är mycket för surt.